

osom[®]

Strep A Test

FOR PÅVISNING AV ANTIGENET *STREPTOCOCCUS A*.




FOR BRUK MED HALSPENSLER

FUNKSJONER:

- ✓ **Meget nøyaktig;** 96 % sensitivitet; 98 % spesifisitet vs. kultur
- ✓ **HURTIG;** Resultater etter 5 minutter
- ✓ **QC INSIDE;** Inkluderer 2 ekstra teststick for ekstern QC-testing
- ✓ **LETT Å LESE;** Resultater i to farger
- ✓ **TEKNISK STØTTE I VERDENSKLASSEN;** Bemannet av medisinske teknologer




TESTPROSEDYRE / RESULTATENE

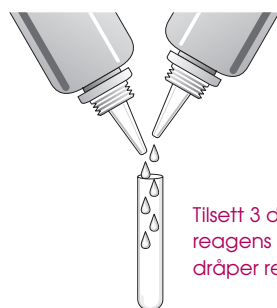

Tilsett 3 dråper reagens 1 og 3 dråper reagens 2




Sett inn vattpinne og bland

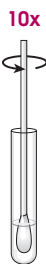

10x



La stå i 1 MINUTT

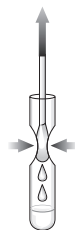


Ta vattpinnen ut av prøverøret

Sett teststick i ekstraherte prøven



Les av resultatene etter 5 MINUTTER

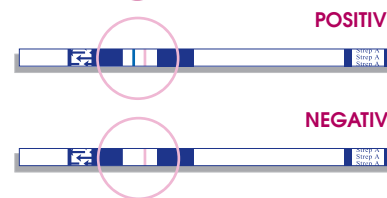

BESTILLINGSINFORMASJON

○ OSOM[®] STREP A TEST
○ OSOM[®] STREP A TEST

KONFIGURASJON

50 TESTER + 2 TESTER FOR QC
20 TESTER

KATALOGNUMMER

141 ELLER 141E (CE MARKED)
141E-20 (CE MARKED)

SEKISUI
DIAGNOSTICS

THE AMERICAS
Sekisui Diagnostics, LLC
4 Hartwell Place
Lexington, MA 02421
Phone: 800 332 1042
Fax: 800 762 6311
Email: questions@sekisuidiagnostics.com
ISO 13485:2003 Certified

INTERNATIONAL
Sekisui Diagnostics (UK) Limited
50 Gibson Drive
Kings Hill, West Malling, Kent, ME19 4AF, UK
Phone: +44 (0) 1732 220022
Fax: +44 (0) 1732 220024
Email: info@sekisuidiagnostics.com
ISO 9001:2000 Certified, ISO 13485:2003 Certified

OSOM[®], OSOM Training-logoen og QC Inside-logoen er varemerker i USA tilhørende Sekisui Diagnostics, LLC.
©2013 Sekisui Diagnostics, LLC – Med enerett



1442-0 04/13