

OSOM Strep-A

Sensitivitet: 96 %
Spesifisitet: 97,80 %
Antall reagenser: 2
Antall test: 20/52
Varenummer: 11141
Skup testet
FDA godkjent



1. Sett 3 dråper reagent 1 (rosa) og 3 dråper reagent 2 i reagensglasset (oppløsningen skal bli lys gul)
2. Sett umiddelbart vattpinnen i reagensglasset.

3. Bland oppløsningen kraftig ved å rotere vattpinnen hardt mot siden av glasset minst 10 ganger. La det stå i 1 minutt. Klem så mye væske som mulig fra vattpinnen ved å klemme sammen sidene på glasset, mens du trekker ut vattpinnen. Kast vattpinnen.

4. Ta en testpinn. Sett den absorberende enden av testpinnen ned i den ekstraherte prøven.

5. Les av resultatet etter 5 minutter.

Positiv: En blå teststrek og en rød kontrollstrek er et positivt resultat.


Negativ: En rød kontrollstrek alene er et negativt resultat.



1 minut



1-5 minutter

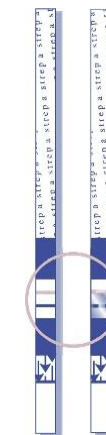

Positivt



Negativt

MG
MEDIGROUP

Kajerødgade 38
DK-3460 Birkerød
+45 45 76 54 25

info@medigroup.dk

www.osom.dk & www.osom.se